

kemvit

PUHTAUS
JONKA
TUNNET



KW Desinfektion

LIFE CLEAN



Käyttökohteet/työmenetelmät

Pesevä pintadesinfiointiaine

Käyttötarkoitus

Patentoitu alkoholivapaa, pesevä desinfiointiaine kaikille pinnoille ja välineille. Koostuu 99,6% vedestä.

KW Desinfektion LifeClean on yksinkertaista käyttää – levitä aine pinnalle, anna vaikuttaa ja pyyhi. Tuote sopii käytettäväksi laaja-alaisesti sairaaloissa, terveydenhuollossa, hoiva-alalla, elintarvikkeiden käsittelyssä, siivouksessa ja päiväkodeissa.

KW Desinfektion LifeClean tuhoaa mahdollisen biofilmin, ehkäisee moniresistenssin alkamisen ja kehittymisen sekä omaa erityisen laajavaikutteisen desinfiointitehon. Vaikutusaika 30 s – 2 min riippuen mikrobista.

Tehokas bakteereja vastaan, kuten E. Coli, salmonella ja campylobakteeri (*2 min), vaipallisia viruksia vastaan, kuten influenssavirus, herpes simplex-virus, HIV ja hepatit B (*30 s-1 min), vaipattomia viruksia vastaan, kuten calicivirus, polio- ja adenovirus (*1 min), hiivasientä vastaan, kuten C. albicans ja C. auris (*1-2 min), mustahometta ja itiöitä vastaan (mukaan lukien Clostridioides difficile (*2 min).

Biosidiasetus: PT 2, PT 3, PT 4.

High-level disinfectant.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Ainoastaan ammattikäyttöön

* tuotteen vaikutusaika pinnalla ennen pois pyyhintää

Tuotekoodi

1809805

180981

Myyntierä

6 x 500 ml

6 x 1 L

GTIN (kpl)

6420617270193

6420617271756

Ominaisuudet

Kellertävä, miedosti kloorille tuoksuva neste

Tuote on biologisesti nopeasti hajoava

KW Desinfektion LifeClean täyttää mm. seuraavat EN-standardit: EN 13697, EN 13704, EN 13705, EN 17126, EN 13727 (itiöt) EN14476, EN 16777, EN 14675, EN 14348. EN 14349 (vaipalliset ja vaipattomat virukset) mukaan lukien Poliovirus, Adenovirus, Murine norovirus (MNV), SARS-CoV-2 (Covid-19) EN 14561, EN 14563, EN 14348, EN 14562, EN 13727, EN16615, EN 17387 (bakteerit, ml. mykobakteerit) EN 13624, EN 14562, EN 16615 (sienet, hiivat)

Sisältää

Klooridioksidiseos 200 ppm ClO2 ja tensidejä

Käyttövalmis, ei varoitusmerkintöjä

Tuotteen ympäristöohje

Pakkauksen kierrätysohjeet tuotteen etiketissä

Sisällön hävitysohje käyttöturvallisuustiedotteessa

Varastointi

Säilytetään huoneenlämmössä, auringonvalolta suojattuna.

Katso voimassaolo pakkauksesta, säilyvyys 18 kk valmistuspäivästä.

Avattuna 4 viikkoa avaamispäivästä. Säilytettävä ainoastaan alkuperäispakkauksessa.

Valmistusmaa

Suomi

Tuotekortti 3/2023

kemvit

PUHTAUS
JONKA
TUNNET



KW Desinfektion

LIFE  CLEAN

Pesevä pintadesinfiointiaine

Käyttöohje

Sopii kaikille pinnoille ja toimii kaikissa olosuhteissa.

1. Levitä/suihkuta KW Desinfektion puhdistettavalle pinnalle.
2. Vaikutusaika 30 s – 2 min.
3. Pyyhi pinta.
4. Merkitse tuotteen avauspäivä etikettiin. Avatun tuotteen käyttöaika 4 viikkoa. Sulje pakkaus aina käytön jälkeen.

KW Desinfektion LifeClean ei ole vaaraksi terveydelle tai ympäristölle.



Käyttökohteet/työmenetelmät

Hyödyt

- Yksi tuote kaikkien pintojen desinfiointiin
- Kliinisesti testattu, EN-standardin hyväksytty
- Hyvä puhdistusteho
- Tehoa biofilmiin
- Ympäristöystävällinen – pieni annostus
- Miellyttävä työskennellä – mieto tuoksu
- Ei riskiä resistenssin kehittymiselle

Ainoastaan ammattikäyttöön

Tuotekortti 3/2023